

VeriRef® y VeriRef Gold® Condiciones preanalíticas


(Cód. 16200 y 16203)

REQUISITOS DE LAS MUESTRAS REMITIDAS A REFERENCE LABORATORY PARA ESTUDIOS DE CRIBADO PRENATAL NO INVASIVO (Cód. 16200 - 16203).

INSTRUCCIONES DE USO DE TUBOS STRECK CELL-FREE DNA (1 TUBO DE 10 mL PARA CADA PACIENTE)

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA:

1. Obtención de la muestra por venopunción, siguiendo los procedimientos estandar.
2. Llenar el tubo por completo.
3. Invertir inmediatamente y con suavidad el tubo entre 8 y 10 veces. Un mezclado tardío o inadecuado puede resultar en unos resultados del test poco fiables.

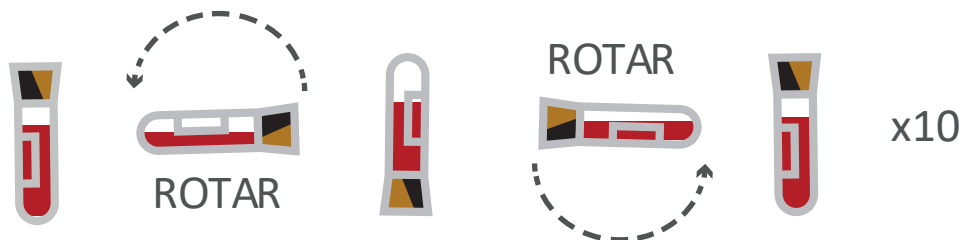

4. Tras su obtención, se debe mantener a temperatura refrigerada o ambiente. No congelar.

RECUERDE QUE...

- Es imprescindible etiquetar correctamente el tubo con la fecha de nacimiento y el nombre o código de la paciente y consignar la fecha y la hora de extracción de la muestra de sangre. Enviar a temperatura refrigerada o ambiente.
- La muestra debe remitirse a Reference sin demora. No olvide adjuntar el documento de solicitud de análisis y el consentimiento informado debidamente rellenado y firmado.

ANTES DE LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA ES CONVENIENTE AVISAR AL LABORATORIO.

ROGAMOS VERIFICAR CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DEL VERIREF AL SOLICITARLO (16200 VERIREF /16203 VERIREF GOLD).

ENVIAR SOLO EL CONSENTIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA CADA DETERMINACIÓN.